

検査スタッフを守ります！

ドライブスルー方式

# 発熱外来・ PCR検査用長手袋



ドライブスルー方式の  
新型コロナウイルスPCR検査で  
乗用車の窓枠に取り付けて行う  
ビニール製の長手袋です。

[導入実績] 長野県佐久市 PCR検査センター他

検査に当たるスタッフが車外から長手袋に手を通し入れ、  
車内の検査対象者から検体を採取します。

量産体制を整え日本全国へ出荷しています。導入相談はお気軽にお問い合わせください。

お問合せ

## 株式会社 大東美装

〒385-0051 長野県佐久市中込 1-1-3

☎ 0267-62-6291 (受付時間：平日 9:00～17:30)

mail: contact@daitobiso.com ※24時間受付



ホームページ  
<https://daitobiso.com>



「平置き姿図」

素材：低密度ポリエステル

サイズ：0.040mm×900mm×10000mm

様々な車種に対応できるサイズです。

1回の検査ごとに廃棄する使い捨てとなります。

step  
1



## 装着【1】

- ① 検査位置に車を誘導し、窓ガラスは指示されるまで下げないように被検査者に注意ください。
- ② 被検査者が乗っている座席側の窓に立ち、長手袋の手袋側を車内に向け広げます。
- ③ 平面長手方向を横に窓フレーム沿って屋根に市販マグネットバーで上部を固定します。下部（左右）もマグネットにて固定します。
- ④ 上記作業が完了したら、被検査者に合図をして窓ガラスを下げていただきます。

step  
2



## 装着【2】

- ① 被検査者が乗っている座席側の窓に立ち、長手袋の手袋側を車内に挿入いたします。
- ② 下部の中央もまたマグネットにて固定します。これで準備完了です。

step  
3



## 検査【1】

- ① 車内に入れた長手袋に手を入れます。
- ② 検査スタッフの立ち位置は、出来るだけ車体側面に沿ってください。
- ③ 上下マグネットでとめたフィルムの隙間から検査器具を入れ、検査準備いたします。

step  
4



## 検査【2】

- ① 検体を採取したら下のマグネットを外し、手袋に入れている腕を抜きながら、被検査者に窓ガラスを上げていただきます。
- ② 上のマグネットを外して車から離れてください。
- ③ 長手袋を車内側を中にまとめ、規定の処分装置に保管処分ください。

お問合せ

株式会社 大東美装

〒385-0051 長野県佐久市中込 1-1-3

☎ 0267-62-6291（受付時間：平日 9:00～17:30）

mail: [contact@daitobiso.com](mailto:contact@daitobiso.com) ※24時間受付

ホームページ: <https://daitobiso.com>

